



AIALA DRY

Підготовка ІОЛ


- 1** Заповніть картридж дисперсним або менш когезивним віскоеластиком (AJL VISC 1,4%) через центральний отвір до появи віскоеластика з носика картриджа. Віскоеластик не має бути холодним.



- 2** Обов'язково нанесіть краплю краплю віскоеластика під ІОЛ. Нанесіть краплю віскоеластичного розчину на блакитну силіконову прокладку.



- 3** Просуньте плунжер (поршень інжектора) на 3 мм до появи його виступу у вікні, позначеному зеленою стрілкою.

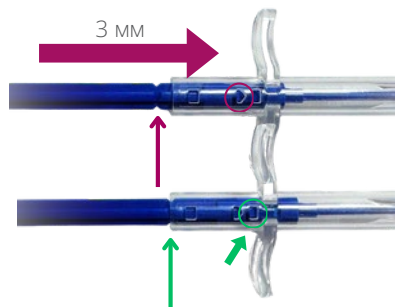

- 4** Закрийте картридж та зачекайте 30 секунд перед імплантацією.



- 5** Обережно просуньте лінзу до найширшої частини картриджа.



- 6** Плавна та безперервно імплантуйте лінзу в око через розріз щонайменше 2,2 мм. Ніколи не затримуйте лінзу в носіку інжектора, щоб уникнути її блокування.



Ключові моменти

- 1** Завжди готуйте лінзу безпосередньо перед імплантацією.
- 2** Завжди витримуйте паузу 30 секунд для гідратації ІОЛ.
- 3** Завжди використовуйте дисперсний або менш когезивний віскоеластик (AJL VISC 1,4%). Не рекомендовано використовувати збалансований сольовий розчин (BSS).

Відео процесу

