




Важлива інформація щодо кільця - розширювача зіниці Canabrava Ring

1. Розташування імплантату

Кільце-розширювач зіниці Canabrava Ring складається з малих заглиблень **1** та великих заглиблень **2**, а також з двох з'єднувальних гачків **3**, розташованих по черзі навколо кільця — одне спрямоване догори, а інше — донизу.

Зверніть увагу: нижні заглиблення (малі) та гачки повинні знаходитися під райдужною оболонкою, а верхні заглиблення (великі) — над нею. Якщо встановити кільце зворотним боком, імплантація буде неможлива.

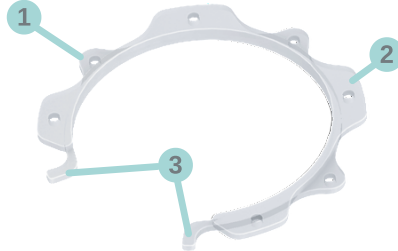

2. Починайте з простих випадків

Оскільки ця техніка є новою, рекомендується розпочинати з простих випадків, щоб відпрацювати техніку безпечним способом.

- Зіниці без фіброзу.
- Зіниці діаметром від 3,5 до 4,5 мм.
- Зіниці зі збереженою анатомією.

Є доступними аудіовізуальні матеріали, в яких продемонстрована ефективність кільця у зіницях будь-якого розміру, а також основні ускладнення після навчання хірурга.

3. Важливість діаметра «від білого до білого»

Кільце призначене для імплантації в очах з діаметром «від білого до білого» від нормального до великого, тобто більш як 11 мм. У випадках пацієнтів з меншими діаметрами, будь ласка, зверніться до нас, щоб ми могли допомогти Вам з особливостями імплантації.



AJL OPHTHALMIC, S.A. Parque Tecnológico de Álava. C/ Ferdinand Zeppelin 1, 01510 Miñano, Álava-España
+34 945 298 256 · ajlsa@ajlsa.com · www.ajlsa.com

Представник AJL OPHTHALMIC, S.A. в Україні
+38 044 574 0460 · info@ajl.com.ua · www.ajl.com.ua

REV: 00
220218UA